

KRZESŁO EWAKUACYJNE TRANSPORTOWE FALCON



Krzesło FALCON jest laureatem konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pn. "Lider Dostępności priorytetowych branż!"

Umożliwia ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się w sytuacjach awaryjnych po schodach. Zaletą takiego krzesła jest jego prosta obsługa. Osoba transportowana (pasażer) ma zapewnioną ochronę dzięki pasom z klamrą bezpieczeństwa i siedzisku w stylu zawiesi, które zapewnia, że użytkownik siedzi wygodnie na krześle i nie można go przechylić do przodu. Rozkład obciążenia na krześle w momencie schodzenia pasażera sprawia, iż czynność ta przebiega płynnie i jest komfortowa zarówno dla użytkownika, jak i operatora.

Charakterystyka/zalety:

- Odpowiednie do transportu w dół i w górę
- Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody, pasy zabezpieczające osobę przewożoną
- Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę
- Może być wolnostojące lub montowane na ścianie
- Solidny, wygodny uchwyt, blokowane tylne koła
- Kontrolowane tarciami pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem
- Łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia
- Gwarancja 5 lat (nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych)
- **Pozwala aby zaledwie jedna osoba (operator) bezpiecznie i łatwo mogła ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóm operatorom przeniesienie takiej osoby schodami w górę, a także przez przeszkody**
- **Znak CE na zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC**
- **Nasze krzesła są sprawdzone pod kątem wytrzymałości i potwierdzone certyfikatem TUV.**

Dane techniczne krzesła:

Wymiary krzesła złożonego: 1 170 x 290 mm

Wymiary krzesła rozłożonego: 1 630 x 525 mm

Waga - 14,9 kg

Maksymalne obciążenie - 200kg

Konstrukcja: aluminium

Instrukcja obsługi:

Przeznaczone jest do użytku przez odpowiednio przeszkolonych i kompetentnych operatorów wyłącznie jako pomoc w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Umożliwia transport ludzi z budynku w sytuacjach zagrożenia lub gdy nie można korzystać z wind.

Krzesło dostarczane jest w komplecie z uchwytem do montażu na ścianie oraz instrukcją obsługi (w zagłówku). Po otrzymaniu krzesła ewakuacyjnego należy wyjąć go z opakowania a wspornik mocujący przymocować do ściany – krzesło należy zawiesić na uchwycie w miejscu zgodnie z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego lub przeprowadzonym audytem ppoż., na odpowiedniej wysokości umożliwiającej czyszczenie podłogi bez konieczności zdejmowania krzesła ze ściany.

Krzesło ewakuacyjne może być obsługiwane przez jedną osobę, ale zaleca się obecność dwóch operatorów, szczególnie jeśli użytkownik jest znacznie większy i cięższy niż operator. Drugi operator może zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi krzesła, pomóc w otwarciu drzwi na drodze ewakuacyjnej i w razie potrzeby pomóc w obsłudze krzesła.

UWAGI:

Operator nigdy nie może pozostawiać użytkownika na krześle bez nadzoru.

Operator nigdy nie może puścić krzesła podczas schodzenia po schodach.

Operator musi unikać gwałtownych ruchów krzesłem, ponieważ może to spowodować obrażenia użytkownika.